



Rua Anhandeara, 14, Cep: 13090-650 - Campinas - SP
Fones(19) 3252 1800 - 3252 1184
Fax: (19) 3294 3255
Celulares (19) 9606 5305 / (19) 9183 4120

Avifauna integral e patologia animal

técnica para suabe de cloaca

Material (para testar um lote):

- 01 frasco de BPW (ÁGUA PEPTONADA TAMPONADA)
- 25 suabes (cotonetes) no mínimo

Método:

Cada cotonete é "passado" na cloaca de duas aves, em seguida deve ser colocado no frasco de BPW, lembrando de quebrar a haste do cotonete, deixando dentro do frasco somente a parte que entrou em contato com a ave (cloaca). A porção da haste que ficou em contato com a pessoa que coletou deve ser desprezada. De preferência usar luvas.

Repetir a operação com cada um dos suabes usando sempre o mesmo frasco para receber os cotonetes "sujos". Este caldo será analisado para pesquisar a presença de Salmonela.

Abrir sempre a embalagem com o suabe pelo lado que está o cabo. As pontas dos suabes devem ser preservadas.

Após os procedimentos anteriores fechar ou vedar o frasco identificando-o de maneira que não derrame durante o transporte; colocar em caixa de isopor sob refrigeração (2 a 8° C) para o laboratório.

